


## MONTAGE KIT MOBILITE

1 - Coucher le fauteuil sur le dos comme indiqué sur la photo ci-dessous.




2 - Retirer les deux bouchons « D » fléchés ci-dessous.

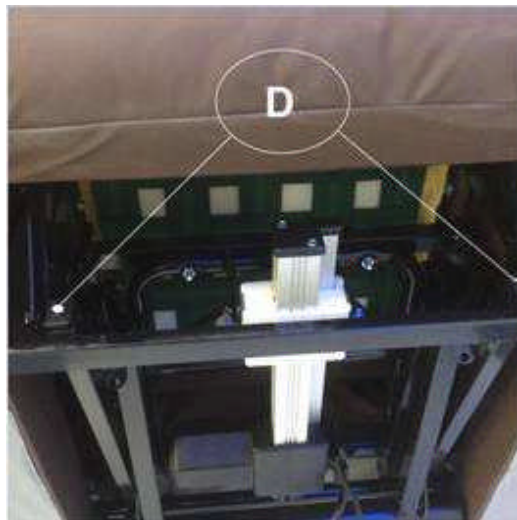

3 - Présenter le KIT MOBILITE en face des deux tubes 20 x 30.  
(la roue doit impérativement être côté sol)



4 - Engager le KIT MOBILITE sur la barre horizontale « B » en exerçant une pression de part et d'autre sur « A » jusqu'au contact de « A » avec « B ». Serrer au maximum les deux molettes « C »

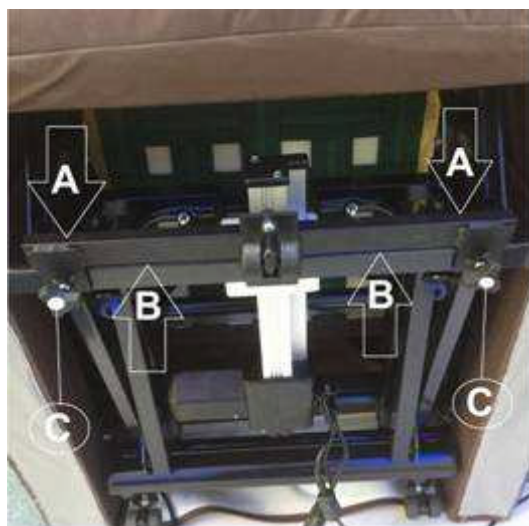

**Le KIT MOBILITE est un outil d'aide au déplacement du fauteuil, en AUCUN CAS ne déplacer le fauteuil équipé de ce KIT avec le PATIENT. Celui-ci devra être IMPERATIVEMENT démonté avant toute nouvelle utilisation du fauteuil par le patient.**  
**En cas d'installation de ce KIT sur d'autres marques de RELEVEURS, nous nous désengageons de tout incident ou accident.**