


Notice de montage et d'utilisation

KIT BATTERIE (compatibles sur tous les fauteuils INNOVSA)

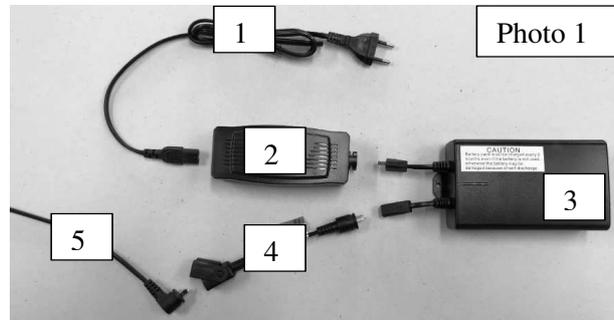

(1) Câble d'alimentation 220 V (déjà fourni avec votre fauteuil) – (2) Transformateur (non fourni pour les COCOON XXL et le NOSTRESS) - (3) Batterie - (4) Câble adaptateur - (5) Câble d'alimentation du vérin ((déjà présent sur votre fauteuil))

Vous souhaitez passer votre fauteuil électrique INNOVSA en mode batterie.

- Débrancher le transformateur présent sur votre fauteuil de votre câble vérin (5)
- Brancher la fiche mâle de votre câble vérin (5) à la fiche femelle de votre adaptateur (4)
- Brancher la fiche mâle cet adaptateur (4) sur la fiche femelle de la batterie (3)

! Votre batterie dispose d'une autonomie d'une journée.

Pour recharger votre batterie

- Débrancher votre batterie (3) de la fiche mâle de votre câble adaptateur (4)
- Brancher la fiche mâle de la batterie dans la fiche femelle du transformateur fourni dans ce kit (2)
- Brancher la fiche femelle de votre câble 220 v (1) sur la fiche mâle de votre transformateur
- Relier l'ensemble à une prise 220 V (3 + 2 + 1)

! Le temps de charge de votre batterie est d'environ 6h.

- **Voyant orange** : batterie est à recharger ou en cours de chargement
- **Voyant vert** : batterie rechargée

Fixation de votre batterie

- Sur un fauteuil releveur COCOON ou un fauteuil de confort NOSTRESS
Fixer votre batterie sur le châssis du fauteuil grâce au velcro qui vous est fourni.
- Sur un fauteuil coquille ou fauteuil à pousser
Fixer le panier métallique qui vous est fourni sur la barre de poussée, comme montré ci-dessous et positionner votre batterie à l'intérieur



! **La batterie doit être chargée tous les jours pour éviter sa détérioration.**
La batterie doit être impérativement rechargée quand le voyant est orange.
La batterie ne doit pas être rangée dans la poche arrière ou toute autre poche.
Votre batterie ne doit pas être stockée dans un endroit humide ou chaud.

